


## **Step by Step.**

Ihre Anleitung zur  
endodontischen Behandlung.

# Step by Step.

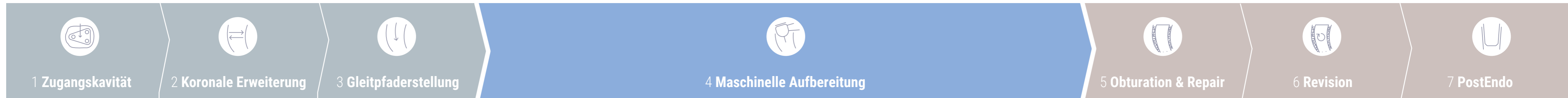

**EndoGuard**

Entfernt Dentinüberhänge und schützt den Pulpa-kammerboden dank nicht schneidender Spitze.

opt. 20.000 min<sup>-1</sup>

**Opener**

Im koronalen Kanaldrittel eingesetzt, entfernt der Opener den Großteil der Bakterien gleich zu Anfang der Behandlung.

opt. 300 min<sup>-1</sup>  
Torque: 2,8 Ncm

**Patency-Feilen**

Thermisch gehärtete Stahl für die manuelle Sondierung.

**EndoTracer**

Graziler Rosenbohrer mit langem, schlanken Hals, um am Instrument vorbei in die Zugangskavität zu schauen.

Ideal für die Isthmuspräparation.

opt. 1.500 min<sup>-1</sup>

**Reziproker Opener**

Die reziprozierende Alternative zu den bekannten Openern.

**PathGlider**

Reduziert das Risiko von Kanalverlagerung und Stufenbildung und ebnet nachfolgenden Feilen den Weg.

opt. 300 min<sup>-1</sup>  
Torque: 0,5 Ncm

**EndoExplorer**

Zierliche, konische Instrumentenköpfe, um minimalst-invasiv und kontrolliert in der primären und sekundären Zugangskavität zu arbeiten. Ideal für Mikroskopanwender.

opt. 2.000 min<sup>-1</sup>

**FQ Opener**

Formt den Kanaleingang, um einen idealen und zugleich geradlinigen Zugang zu schaffen. Aufgrund kleiner Größe und Wärmebehandlung auch Zugang zu engen oder schwer erreichbaren Kanälen, insbesondere MB2.

opt. 300 min<sup>-1</sup>  
Torque: 2,4 Ncm

**FQ Glider**

Schaffung eines funktionellen, reproduzierbaren Gleitpfades. Reduziert das Risiko von Kanalverlagerung und Stufenbildung.

opt. 300 min<sup>-1</sup>  
Torque: 0,8 Ncm

**Procodile Q**

Die Evolution der Flexibilität.

Wärmebehandeltes reziprozierendes 1-Feilensystem mit variabel getapertem Feilenkern.

opt. 300 min<sup>-1</sup>

**FQ Feilen**

Der Weg zur sicheren Endo.

Wärmebehandeltes, rotierendes Feilensystem. Variabel getapertes Feilenkern in Taper .06

opt. 300 min<sup>-1</sup>

020/.04 - 035/.04  
Torque: 1,8 Ncm

045/.04 - 055/.04  
020/.06 - 030/.06  
Torque: 2,4 Ncm

**EnDrive**

Endo hat viele Anforderungen. Hier ist die Lösung.

Neuer batteriebetriebener Endo-Motor mit integriertem Apexlocator und kabellosem Handstück

ED01

**EnGO**

Let's go - mit EnGO!

Das kabellose Handstück mit Feilendatenbank.

ENG013

**EasySeal**

Sealer auf Epoxidharzbasis

Sehr gute Haftung am Dentin für einen dichten Kanalverschluss und zur Vermeidung von Reinfektionen.

**Endo ReStart**

Feilensystem aus NiTi zur effizienten Revisionsbehandlung mit nur 1 - 2 Instrumenten.

opt. 300 min<sup>-1</sup>  
Torque: 1,8 Ncm

**Komet BioSeal**

Biokeramischer Sealer

Wurzelfüllmaterial auf Calciumsilikat-Basis mit bakterizider Wirkung und hoher Biokompatibilität.

**Komet BioRepair**

Biokeramisches Reparaturmaterial ready to use für 8 verschiedene Indikationen

**DentinPost X Coated TitanPost X Coated**

Kurze Stifte aus glasfaserverstärktem Composite und Reintitan für eine minimale Schwächung der Wurzel.

**DentinBuild Evo DentinBond Evo**

Dualhärtendes Composite-System für die Stiftbefestigung und den Stumpfaufbau.



Zugangskavität

**EndoGuard**

- H269Q GK.314.012/016
- H269Q GK.315.016

**EndoExplorer**

- EX1S.204.007
- EX1.204.007
- EX1L.204.007
- EX1.310.007
- EX2S.204.011
- EX2.204.011
- EX2L.204.011
- EX2.310.011

Set 4664

**EndoTracer**

- H1SML31.205.004
- H1SML31.205.006
- H1SML31.205.008
- H1SML31.205.010
- H1SML31.205.012
- H1SML31.205.014
- H1SML34.205.004
- H1SML34.205.006
- H1SML34.205.008
- H1SML34.205.010
- H1SML34.205.012
- H1SML34.205.014

Set 4670

**Endo Access Kit**

4697ST



Koronale Erweiterung

**Opener**

- OP10L19.204.030
- OP10L15.204.030
- OP08L19.204.025

**FQ Opener**

- FQ08L19.204.020

**Reciprocating Opener**

- OPR10L19.204.030
- OPR08L19.204.025



Gleitfaderstellung

**PathGlider\***

- PG03L25.204.015
- PG03L25.204.020

**FQ Glider\***

- FQ03L25.204.015

**Patency Feilen\*\***

- 17525.654.006
- 17525.654.008
- 17525.654.010
- 17525.654.012
- 17525.654.015



Maschinelle Aufbereitung

**FQ Taper .04\***

- FQ04L25.204.020
- FQ04L25.204.025
- FQ04L25.204.030
- FQ04L25.204.035
- FQ04L25.204.045
- FQ04L25.204.055
- FQ04L25.204.025
- FQ04L25.204.055

**FQ Taper .06\***

- FQ06L25.204.020
- FQ06L25.204.025
- FQ06L25.204.030

**FQ Sortiment**

- SORT207
- FQ08L19.204.020
- FQ03L25.204.015
- FQ04L25.204.020
- FQ04L25.204.025
- FQ04L25.204.030
- FQ04L25.204.035

**Procodile Q Taper .06\***

- PRQ6L25.204.020
- PRQ6L25.204.025
- PRQ6L25.204.030
- PRQ6L25.204.035

**Procodile Q Taper .05\***

- PRQ5L25.204.035



- PRQ5L25.204.040

**Procodile Q Taper .04\***



- PRQ4L25.204.045



- PRQ4L25.204.050

**Procodile Q Sortiment**

- SORT184B
- OPR08L19.204.025
- PG03L25.204.015
- PRQ6L25.204.020
- PRQ6L25.204.025
- PRQ5L25.204.035
- PRQ5L25.204.040



Obturation & Repair

**EasySeal**

9978

**Komet BioSeal**

BCS1

**Komet BioRepair**

BCR1 (Spritze)

BCR2 (Kapseln)

**Papierspitzen FQ**

- PPFQ04.000.020
- PPFQ04.000.025
- PPFQ04.000.030
- PPFQ04.000.035
- PPFQ04.000.045
- PPFQ04.000.055
- PPFQ06.000.020
- PPFQ06.000.025
- PPFQ06.000.030

**Guttaperchaspitzen FQ**

- GPFQ04.000.020
- GPFQ04.000.025
- GPFQ04.000.030
- GPFQ04.000.035
- GPFQ04.000.045
- GPFQ04.000.055
- GPFQ06.000.020
- GPFQ06.000.025
- GPFQ06.000.030

**Papierspitzen Procodile Q**

- PPPR06.000.020
- PPPR06.000.025
- PPPR06.000.030
- PPPR05.000.035
- PPPR05.000.040
- PPPR04.000.045
- PPPR04.000.050

**Guttaperchaspitzen Procodile Q**

- GPPR06.000.020
- GPPR06.000.025



Retreatment

**Endo ReStart**



- RE10L15.204.030



- RE05L25.204.025\*\*

**4680 Sortiment**

- RE10L15.204.030 (2x)
- RE05L25.204.025 (4x)



PostEndo

**DentinPost X Coated**

- Set 4650 (Gr. 070)
- Set 4651 (Gr. 090)
- Set 4661 (Gr. 110)

**TitanPost X Coated**

- Set 4657 (Gr. 070)
- Set 4658 (Gr. 090)

**DentinBond Evo**

- 9972 Single-Mix Kapseln
- 9973 2-Flaschen-System

**DentinBuild Evo**

- 9970 (A2)
- 9971 (Opak Weiß)



Endo Motoren

**EnGO**

ENGO13



**EnDrive**

ED01



\*Feilen erhältlich in drei Längen 21, 25, 31

\*\*erhältlich in zwei Längen 21 und 25

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIAO®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, KometBioSeal®, OcluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® und SHAX® sind eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® und EndoPilot® sind eingetragene Marken der Schlumbohm GmbH & Co. KG

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: Januar 2025

#### **Komet Dental**

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo  
Postfach 160, 32631 Lemgo · Germany  
Telefon +49 (0) 5261 701-0  
hello@kometdental.com  
Contact for dealers:  
export@kometdental.de

#### **Verkauf Deutschland:**

Telefon 0800 7701700  
Telefax 0800 7701800  
info@kometdental.de  
www.kometdental.de

#### **Export:**

Telefon +49 (0) 5261 701-0  
Telefax +49 (0) 5261 701-329  
export@kometdental.de  
www.kometdental.com

#### **Komet Austria** Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg  
Telefon 00800 70170070  
Telefax +43 (0) 662 829-435  
info@kometdental.at  
www.kometdental.at

#### **Komet France**

18 rue · Fourcroy · 75017 Paris  
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90  
info@komet.fr  
www.komet.fr

#### **Komet Italy**

Via Gianbattista Morgagni 36,  
37 135 Verona  
Phone +39 (0) 45 11171911  
info@komet.it  
www.komet.it

#### **Komet UK**

Invoice and general correspondence:

27 Old Gloucester St,  
Holborn, London WC1N 3AX  
info@kometuk.com  
www.kometuk.com