




Rocky.

Der Durchbruch beim Kronentrennen.

Eine neue Ära der Zirkonentfernung beginnt.



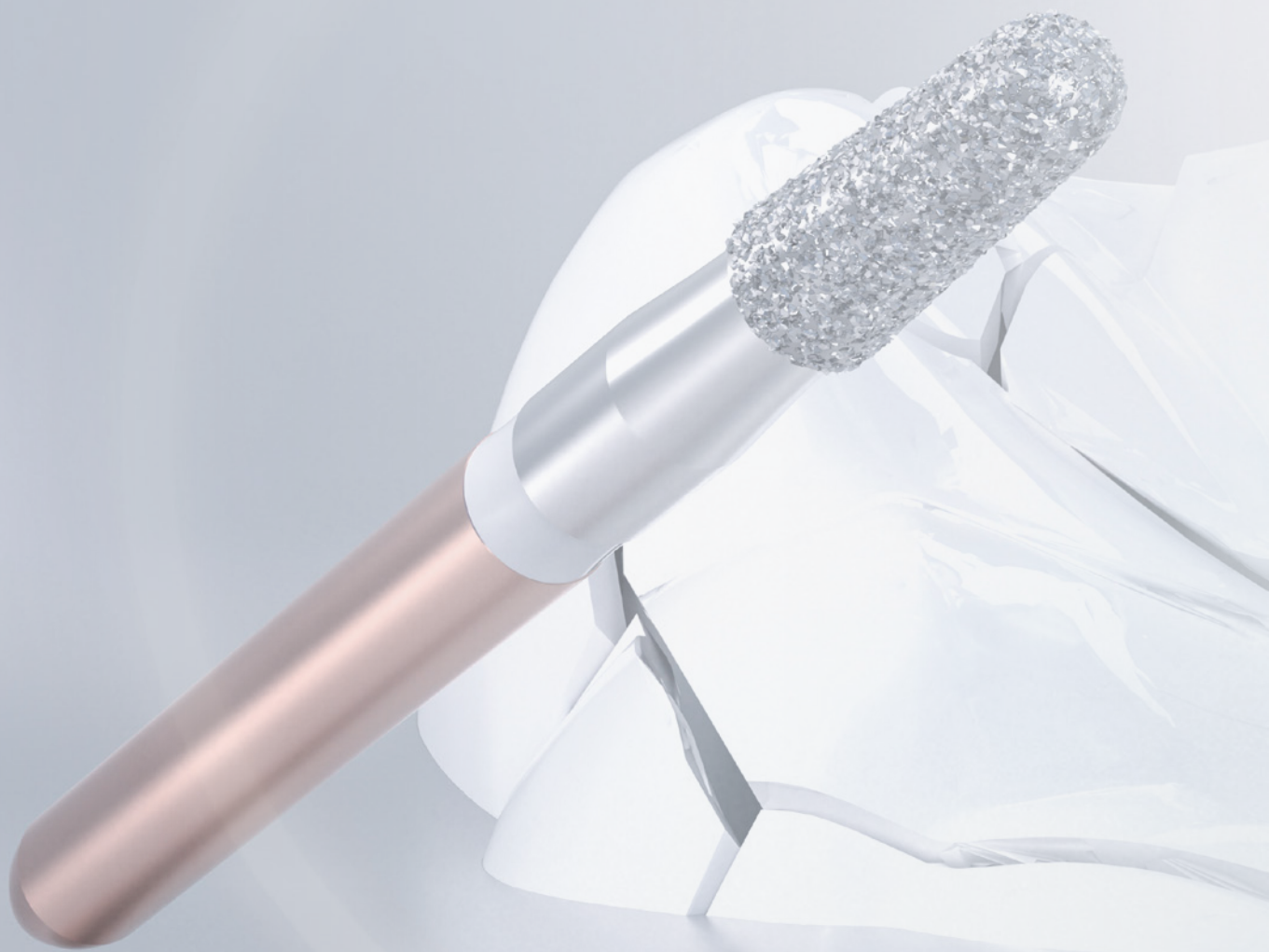

Rocky. Unaufhaltsame Kraft für unbeugsame Zirkonkronen.

Erleben Sie einen Kronentrenner, der den Unterschied macht – Rocky von Komet übertrifft die Konkurrenz mit unübertroffener Schärfe, Geschwindigkeit und Langlebigkeit und durchbricht mühelos selbst die härtesten Keramikkrone.



Zeitersparnis:

Ermöglicht es Anwendern, bis zu 87%* der Zeit einzusparen, die für das Schneiden einer Keramikkrone erforderlich ist.



Außergewöhnliche Schärfe:

Der neue Kronentrenner für Vollkeramikronen bietet eine unübertroffene, um 74%* höhere Anfangsschärfe im Vergleich zu Konkurrenzprodukten.



Längere Standzeit:

Der neue Kronentrenner wurde mit einer außergewöhnlichen Lebensdauer entwickelt, die deutlich länger ist als die herkömmlicher Produkte.




Innovatives Diamantkorn:**

Bietet überlegene Leistung durch ein innovatives Diamantkorn, das von keinem anderen Produkt auf dem Markt übertroffen wird.



Erstklassiges Design:

Mit einem unverwechselbaren Schaft aus Roségold zur einfachen Identifizierung.

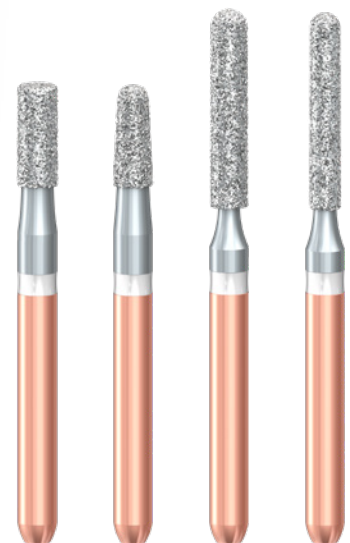

* Quelle: Komet Dental TestLab, mechanische Schnittprüfung 2025. Test basiert auf dem Vergleich zum Wettbewerbsdurchschnitt.

** Deutscher Gebrauchsmusterschutz GM 20 2025 100 047

Rocky.

Der Champion im Kronentrennen.

Effizienzsteigerung in der Zahnmedizin ist entscheidend – und Rocky weist den Weg. Rocky wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Entfernung von Vollkeramikronen zu meistern, und setzt mit seiner um 74%* höheren Initialschärfe und seiner um 87%* schnelleren Schneidleistung neue Maßstäbe. Selbst Zirkonoxid, das für seine Härte bekannt ist, lässt sich mühelos trennen, was die Behandlungszeit erheblich verkürzt.

Das Herzstück der Leistung von Rocky ist ein innovatives*² Diamantkorn der neuesten Generation, das für außergewöhnliche Schärfe, Haltbarkeit und Präzision entwickelt wurde. Dies sorgt für einfachere, schnellere Abläufe mit weniger Aufwand. Der markante roségoldene Schaft ermöglicht eine schnelle Identifizierung in einer belebten Praxis und verbindet Leistung mit Eleganz.

Rocky wurde auf der Grundlage von mehr als 100 Jahren Erfahrung von Komet Dental entwickelt und stellt die neueste Innovation im Bereich des Kronentrennens dar – eine nie dagewesene Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und Standzeit.

Erleben Sie modernste Technologie, die die Effizienz in der modernen Zahnmedizin neu definiert.



© Univ.- Prof. Dr. Daniel Edelhoff/KometDental



„Noch nie war es so einfach monolithische Zirkonoxid-Kronen zu trennen.“

Prof. Dr. Daniel Edelhoff (Universität München)



„Ich hatte das Privileg, diesen neuen speziellen Bohrer auszuprobieren, und ich kann sagen, dass es ein fantastisches Instrument ist, mit dem sich Zirkonkronen schnell, scharf und vorhersehbar trennen lassen.“


Dr. Fabio Scutella (Mailand, Italien)

* Quelle: Komet Dental TestLab, mechanische Schnittprüfung 2025. Test basiert auf dem Vergleich zum Wettbewerbsdurchschnitt.

^{**} Deutscher Gebrauchsmusterschutz GM 20 2025 100 047



© Univ.- Prof. Dr. Daniel Edelhoff/KometDental

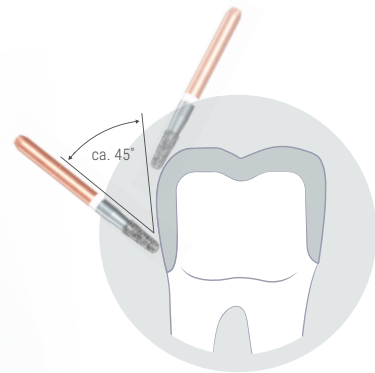

Trennung vollkeramischer Kronen

- Spaltung vollkeramischer Kronen mit Rocky (CERCS, CERCSC): Bei Frontzähnen wird die axiale Fläche bis zur Inzisalkante und darüber hinaus gespalten. Molaren: Schneiden Sie entlang der Okklusalfäche, um die Krone einfach aufzubrechen.
- Adhäsive Kronen können mit einer Kronenspreizzange Stück für Stück geöffnet werden. Beginnen Sie im zervikalen Bereich – so weit wie möglich – und entfernen Sie dann Schritt für Schritt weitere Fragmente, wobei Sie in inzisaler oder okklusaler Richtung arbeiten. Auf diese Weise können Hebelkräfte auf den Kronenkern weitgehend vermieden werden.
- Schleifen Sie die verbleibenden Fragmente mit dem längeren Kronenschneider CERCS.

Gebrauchsanleitung:

- Optimale Drehzahl:
Bei Gebrauch mit dem neuen Synea Power Edition Winkelstück wird eine optimale Geschwindigkeit von (160.000 min⁻¹ im Mikromotor empfohlen.
- Immer mit genügend Kühlung arbeiten (mindestens 50 ml/Min.)
- Einen Anpressdruck von max. 2N nicht überschreiten.
- Wir empfehlen, die Drehzahl auf 120.000 min⁻¹ zu reduzieren, wenn Sie mit Legierungen arbeiten, die Instrumente „springen“ lassen. Alternativ können Sie auch mit einer Dentalturbine bei niedrigem Anpressdruck arbeiten.
- Für eine optimale Schneidleistung setzen Sie das Instrument in einem Winkel von 45° an der Krone/Füllung an.

Rocky. Das Sortiment.

Schneiden von vollkeramischen
Kronenmaterialien zur Entfernung einer
unzureichenden Primärversorgung



- **CERCSC.314.016**
Kronentrenner, Diamant,
zylindrisch, kurz



- **CERC.314.012**
Kronentrenner, Diamant,
zylindrisch, rund



- **CERCS.314.016**
Kronentrenner, Diamant,
konisch, kurz



- **CERC.314.014**
Kronentrenner, Diamant,
zylindrisch, rund



Rocky & Synea Power Edition: Das ultimative Duo zum Entfernen von Kronen

Erleben Sie die unschlagbare Synergie von Rocky, dem Kronentrenner von Komet, und dem Synea Power Edition Winkelstück. Dieses Duo wurde für die mühelose Entfernung selbst der schwierigsten Vollkeramikronen entwickelt und bietet außergewöhnliche Schärfe, Haltbarkeit und Präzision und schützt dabei auch noch Ihre Standardhand-

stücke vor übermäßigem Verschleiß. Die Synea Power Edition ist ein Hochleistungswinkelstück, das für anspruchsvolle zahnmedizinische Anwendungen entwickelt wurde. Es wurde für besonders harte Keramiken wie Zirkon konzipiert und bietet ein überlegendes Drehmoment, eine verbesserte Schneidleistung und eine um 20 %* längere Lebensdauer. Durch den Gebrauch dieses Spezialisten verlängern Sie die Lebensdauer

Ihrer Standardwinkelstücke. Mit dem innovativen schwarzen Druckknopf für mühelosen Bohrerwechsel und dem effektiven Kühspray für gleichmäßiges Schneiden minimiert dieses langlebige Winkelstück die Ausfallzeiten und maximiert die Präzision.

Entwickelt für Präzision und gebaut für Leistung: Rocky, der Kronentrenner und das Synea Power Edition Winkelstück definieren die Kronenentfernung neu und bewältigen mühelos selbst die härtesten Vollkeramikronen, zum Beispiel aus Zirkon.

extra einfacher Bohrerwechsel mit einzigartigem und unverwechselbarem schwarzen Druckknopfdesign

extra präzise mit neuem Kopfdesign für bessere Bohrerführung.

extra langlebig mit mindestens 20%* längerer Lebensdauer

extra stabiles Spannsystem mit mehr als 20%* mehr Spannkraft

extra robust für weniger Servicekosten

extra leistungsstark für die Entfernung von hochfesten Materialien

extra stark mit mehr Drehmoment und besserer Abtragsleistung



* Source: W&H test laboratory for verification, test report 1124

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160, 32631 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com
Contact for dealers:
export@kometdental.de

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 662 829-434
Telefax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Via Gianbattista Morgagni 36,
37135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Invoice and general correspondence:
27 Old Gloucester St,
Holborn, London WC1N 3AX
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIA0®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® und SHAX® sind eingetragene Handelsmarken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® und EndoPilot® sind eingetragene Handelsmarken der Schlumbohm GmbH & Co. KG

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand Februar 2025