



DIAO.

Zachwycające wykonanie -
wyczuwalna kontrola

Większa efektywność w codziennej pracy.

DIAO



DIAO.

Złoty standard w kolorze różowego złota do preparacji pod korony, mosty i opracowywania ubytków.

Delikatne i nieskomplikowane opracowywanie

Optymalna kontrola dzięki dużej wydajności cięcia

Koncentracja siły zapewnia bardzo dużą wytrzymałość

Ostrość, która utrzymuje się przez bardzo długi czas

Ułatwia codzienną pracę:

Wypróbuj doskonałe instrumenty w kolorze różowego złota

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, DIAO®, EnDrive®, EnFill®, EnPack®, ETNA®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, FQ®, H4MC®, Komet BioSeal®, OccluShaper®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Rocky®, SHAX® to zastrzeżone znaki towarowe Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są częściowo chronione prawem marki, prawem patentowym i prawem autorskim. Brak specjalnego oznaczenia lub znaku ® nie oznacza braku ochrony prawnej.

Materiał ten jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, również w odniesieniu do tłumaczenia, przedruku i powielania, w tym częściowego. Bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy żadna część niniejszego materiału nie może być w jakiegokolwiek formie (fotokopia, mikrofilm lub innym sposobem) reprodukowana lub przetwarzana za pomocą systemów elektronicznych.

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru oraz wystąpienia błędów drukarskich.

średnio

34 %

większa wytrzymałość i

27 %




większa ostrość niż
tradycyjnych instrumentów*

*źródło: TestLab Komet Dental,
mechaniczny test cięcia 2020

**Wydajny i skuteczny,
połączenie pereł i diamentu.**

Innowacyjna powłoka DIAO to
perełki ceramiczne otoczone
ziarnami diamentu.

W ten sposób nacisk koncen-
truje się dokładnie na czubku,
a diamenty pracują bardzo
efektywnie.

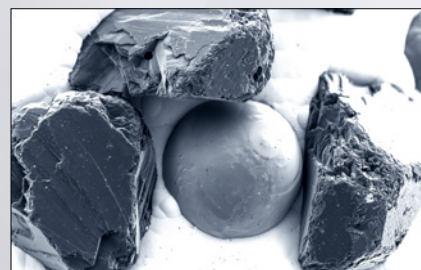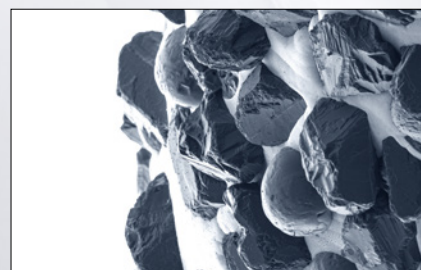
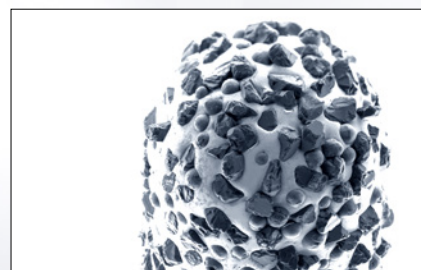


DIAO. Większa wydajność w gabinecie – każdego dnia.

DIAO to innowacyjne rozwiązanie zachwycające podczas preparacji pod korony, mosty i przy opracowywaniu ubytków. Ostrość oraz możliwość kontrolowania pracy sprawiają, że leczenie staje się bardziej skuteczne, mniej męczące, a codzienna praca bardziej efektywna.

Narzędzie DIAO w unikalnym odcieniu różowego złota jest łatwe do odróżnienia, dzięki czemu można je szybko wyszukać podczas kolejnego zabiegu, znacznie usprawniając pracę w gabinecie.

Co sprawia, że innowacja DIAO jest tak wyjątkowa? Połączenie perełek ceramicznych i drobinek diamentowych zapewnia bezkonkurencyjną wydajność i kontrolę nad narzędziem. Innowacyjna powłoka diamentowa DIAO zapewnia znacznie dłuższą żywotność niż w przypadku porównywalnych narzędzi, a także ułatwia ich czyszczenie.

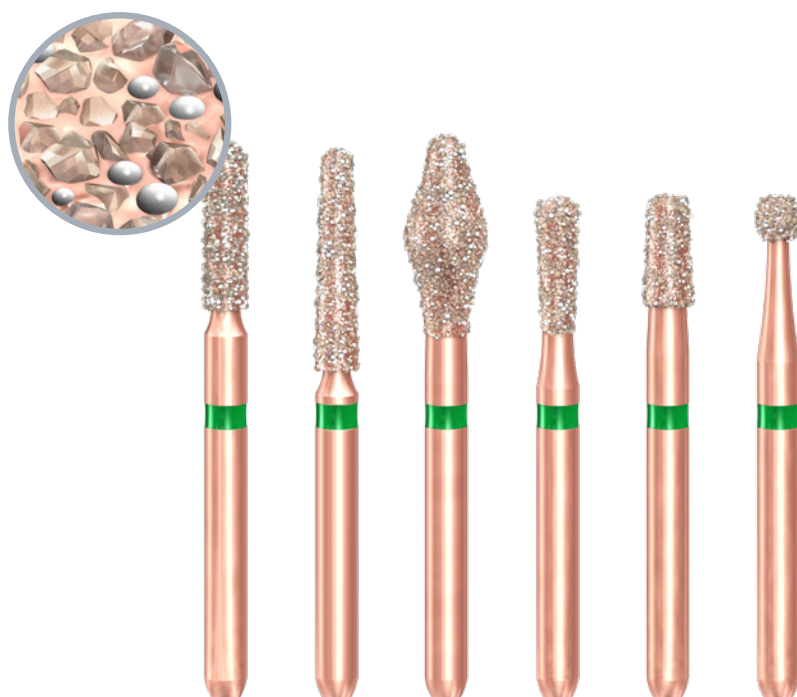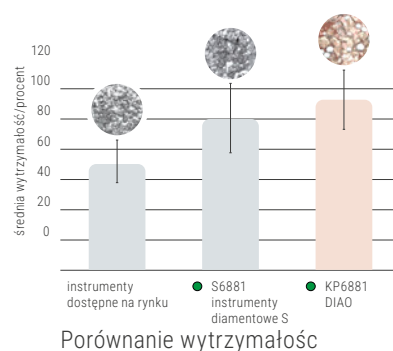

DIAO. Poczuj innowacyjne rozwiązania.

Skoncentrowana wydajność zapewniająca możliwość optymalnej kontroli oraz efektywne znoszenie tkanki

DIAO zachwyca znacznie łatwiejszym użytkowaniem, spokojnym obrotem, efektem ślizgania się po zębach. Pomimo możliwości optymalnego kontrolowania praca z tym instrumentem zapewnia szybkie i bardzo wydajne znoszenie tkanki.



Wskazówki dotyczące pracy:

- Stosować z obrotami $\odot_{opt.} 160.000 \text{ min}^{-1}$, najlepiej w czerwonej kątnicy, alternatywnie także w turbinie. Instrumenty z ograniczeniem liczby obrotów $\odot_{max.} 300.000 \text{ min}^{-1}$ nie mogą być używane w turbinie. (np. KP6370.314.030/035 lub KP6845KR.314.025 – por. dane na etykiecie)
- Należy zwrócić uwagę na wystarczające chłodzenie sprayem, minimum 50 ml/min.
- Po zakończeniu preparacji wstępnej należy użyć instrumentu o takim samym kształcie do wygładzenia powierzchni.
- Instrumenty DIAO charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością przy znoszeniu tkanki, nie ma potrzeby używania siły (<2N).

Narzędzia do preparacji koron

Narzędzia o długości roboczej 8 mm

walec z zaokrągloną krawędzią



● KP6837KR.314.012



● KP6837KR.314.014



● KP6837KR.314.016

stożek z zaokrągloną krawędzią



● KP6847KR.314.014



● KP6847KR.314.016



● KP6847KR.314.018

walec zaokrąglony



● KP6881.314.012



● KP6881.314.014



● KP6881.314.016



● KP6881.314.018

stożek zaokrąglony



● KP6856.314.012



● KP6856.314.014



● KP6856.314.016



● KP6856.314.018



● KP6856.314.021

walec w kształcie torpedy



● KP6878.314.012



● KP6878.314.014



● KP6878.314.016

stożek w kształcie torpedy



● KP6878K.314.012



● KP6878K.314.014



● KP6878K.314.016



● KP6878K.314.018



● KP6878K.314.021

Płomień



● KP6862.314.012



● KP6862.314.014



● KP6862.314.016

Narzędzia o długości roboczej 9 mm

Elipsa



● KP6979.314.012



● KP6979.314.014



● KP6979.314.016



● KP6979.314.018

Elipsa, stożkowa



● KP6979K.314.021



● KP6979K.314.023

Narzędzia o długości roboczej 10 mm

walec zaokrąglony



● KP6882.314.012



● KP6882.314.014



● KP6882.314.016

walec w kształcie torpedy



● KP6879.314.012



● KP6879.314.014



● KP6879.314.016



● KP6879.314.018

stożek zaokrąglony



● KP6850.314.014



● KP6850.314.016



● KP6850.314.018

stożek z zaokrągloną krawędzią



● KP6848KR.314.014



● KP6848KR.314.016



● KP6848KR.314.018

stożek w kształcie torpedy



● KP6879K.314.014



● KP6879K.314.016



● KP6879K.314.018



● KP6879K.314.021

płomyk



● KP6863.314.012



● KP6863.314.014



● KP6863.314.016

Narzędzia o długości roboczej 12 mm

walec zaokrąglony



● KP6882L.314.014

stożek zaokrąglony



● KP6856XL.314.021

walec w kształcie torpedy



● KP6879L.314.014

Occlusal/Redukcja po stronie językowej

OccluShaper



● KP6370.314.030



● KP6370.314.035



● KP6811.314.033



● KP6811.314.037



● KP6909.314.040

jajko



● KP6379.314.018



● KP6379.314.023



● KP6379E.314.029

pączek



● KP6368.314.016



● KP6368.314.023

DIAO. Asortyment.

Instrumenty z częścią roboczą o długości 6 mm

walec z zaokrągloną
krawędzią

● KP6836KR.314.012

● KP6836KR.314.014

● KP6836KR.314.016

w kształcie walca
zaokrąglony

● KP6880.314.012

● KP6880.314.014

● KP6880.314.016

w kształcie torpedy

● KP6877.314.012

● KP6877.314.014

● KP6877.314.016

Instrumenty do prepracji ubytków

walec z zaokrągloną
krawędzią

● KP6835KR.314.012

● KP6835KR.314.014

stożek z zaokrągloną
krawędzią

● KP6845KR.314.018

● KP6845KR.314.025

w kształcie kulki

● KP6801.314.012

● KP6801.314.014

● KP6801.314.016

● KP6801.314.018

● KP6801.314.023

w kształcie gruszki
zaokrąglony

● KP6830RL.314.012

● KP6830RL.314.014

● KP6830RL.314.016

● KP6830RL.314.018

w kształcie gruszki
wydłużony

● KP6830L.314.012

● KP6830L.314.014

● KP6830L.314.016

● KP6830L.314.018

● KP6830L.315.014

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany
Phone +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com

Komet Germany

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 800 7701-700
Fax +49 (0) 800 7701-800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Komet Austria

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Phone +43 (0) 0800 70170070
Fax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

SA à conseil d'administration, s.a.i.
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Komet Italy S.r.l.
Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Komet Dental Instruments UK Limited
Unit 8 Arden House · Marsh Lane
Hampton In Arden · B92 0AJ
Phone +44 (0) 2046 200580
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Komet International Distribution

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 5261 701-0
export@kometdental.de
www.kometdental.com