


SonicLine

Détartrage/Paro | SF1 – 8

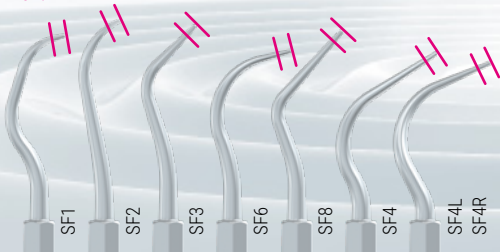

— max. 2 mm



Indication

Niveau de puissance SF1LM/S

	1	2	3
Détartrage	●	●	●
Prophylaxie implantaire	●	●	●
Paro*	●	●	●
Préparation coronaire	●	●	●
Préparation des surfaces proximales (SFM/D6, SFM/D7)	●	●	●
Facettes, Micro/Bevel	●	●	●
Traitement des sillons	●	●	●
Endodontie*	●	●	●
Chirurgie*	●	●	●

*Remarque : pour certains instruments de cette indication, il existe des restrictions concernant les niveaux de puissance. Merci de consulter le mode d'emploi pour connaître le niveau de puissance approprié.

● permis
● seulement permis pour une courte période
● interdit