

Compass | Profilassi

Raccomandazioni per l'impiego di strumenti per la profilassi nello studio dentistico



SonicLine

Punte a vibrazione sonora

1 Applicazione | **Scaling** (fino a una profondità di 2 mm)



2 Applicazione | **Scaling** (fino a una profondità di 4 mm)



PiezoLine

Punte a vibrazione sonora **EM1** –
compatibili con unità EMS



Punte a ultrasuoni **S11** –
compatibili con unità Sirona®



Punte a ultrasuoni **KA1** –
compatibili con unità KaVo PIEZOlux™




Punte a ultrasuoni **ST1** –
compatibili con unità Satelec® e NSK




Gommini e spazzolini

3 Applicazione | **Lucidatura**


Gommini

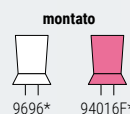

9696* 94016F*

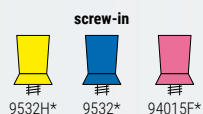


9532H* 9532* 94015F*

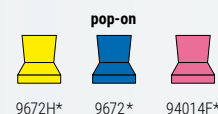


9672H* 9672* 94014F*

Spazzolini e mandrini

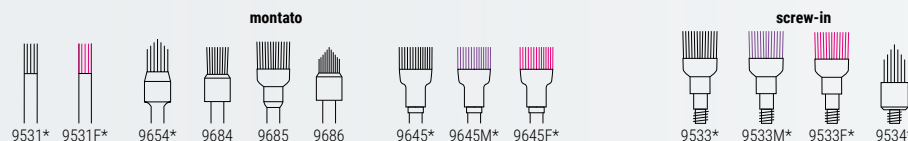

9531* 9531F* 9654* 9684 9685 9686 9645* 9645M* 9645F* 9533* 9533M* 9533F* 9534*

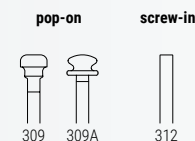

309 309A 312

Gommini e spazzolini

Uso appropriato

- Lucidare sempre a bassa pressione operativa, per ridurre al minimo lo sviluppo di calore.
- Procedere alla lucidatura sempre con movimenti circolari.

Numero di giri

🌀_{opt.} 1.500 rpm

Un numero di giri elevato comporta risultati superficiali di qualità inferiore. **Il numero massimo di giri ammissibile** è indicato sulla confezione e nel catalogo. **Il mancato rispetto del numero di giri massimo ammissibile comporta un notevole rischio di infortuni.**

Punte a vibrazione sonora e punte a ultrasuoni

Uso appropriato

- Si prega di osservare i livelli di potenza; il livello di potenza corretto è indicato nelle istruzioni per l'uso allegate.
- Prima di procedere all'applicazione sul dente, azionare la punta con sufficiente spray di raffreddamento. A questo scopo regolare una portata elevata per tutti i scaler.
- Le punte devono essere utilizzate con una pressione operativa lieve, poiché una pressione operativa troppo elevata smorza l'oscillazione della punta riducendone l'efficacia.

