



¡En marcha, con el **EnGO!**

La pieza de mano inalámbrica con base de datos de limas.





Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, DIAO®, EnDrive®, EnFill®, EnPack®, ETNA®, F360®,
F6 SkyTaper®, FQ®, H4MC®, Komet BioSeal®, OccluShaper®,
OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Rocky®,
SHAX® son marcas registradas de
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Los productos y las denominaciones comerciales que
figuran en estas páginas se encuentran protegidos en
parte por patente o por derecho de autor o de marcas. La
ausencia de una nota específica o la no figuración del
signo ® no significa que no exista tal protección jurídica.

Esta obra está protegida por derecho de autor. Todos los
derechos de divulgación, incluyendo reproducción total o
parcial de fotos o textos, reimpresiones o extractos,
almacenamiento, recuperación o difusión mediante
cualquier sistema, están reservados y requieren de
nuestro consentimiento por escrito.

Los colores y los productos están sujetos a alteraciones,
exceptuando errores de impresión.

Flexible. Seguro. Potente.

EnGO – para un tratamiento endodóntico agradable.

Con la pieza de mano Komet EnGO tiene en sus manos un verdadero multit talento para la endodoncia. Ya sea recíproco o rotatorio: EnGO es adecuado para todos los tipos de movimiento habituales y ofrece opciones de ajuste individuales para la velocidad, el par de rotación y el ángulo. Las especificaciones de las limas que utiliza con más frecuencia pueden memorizarse en el aparato. Gracias a los parámetros preinstalados de todos los sistemas Komet, podrá empezar directamente con su próximo tratamiento.

La pieza de mano ergonómica e inalámbrica se adapta perfectamente a la mano de usuarios diestros y zurdos y permite trabajar cómodamente incluso durante tratamientos prolongados. Gracias a su contra-ángulo giratorio de 360°, EnGO le ofrece un acceso óptimo al lugar de tratamiento. Además, el uso de EnGO es especialmente seguro: la cabeza pequeña garantiza una buena visibilidad y el localizador de ápices integrado le permite preparar con precisión hasta el ápice.

ENGO13



El EnGO le acompaña por el tratamiento endodóntico.

La pieza de mano inalámbrica con memoria de limas programable.

Parámetros individuales.

Con la memoria integrada pueden almacenarse hasta diez programas de movimiento diferentes. La velocidad, el torque y el ángulo pueden ser ajustados para cada lima. Los parámetros de los sistemas de limas Komet están preinstalados, por lo que podrá comenzar su próximo tratamiento inmediatamente.

Ergonomía sofisticada.

Ya sea diestro o zurdo: la pantalla LCD integrada puede ajustarse a sus necesidades personales. Además, la pieza de mano EnGo puede sostenerse perfectamente en la mano y permite trabajar con poca fatiga. La distribución equilibrada del peso de la unidad reduce aún más la tensión en la mano y la muñeca.



Óptimo control durante todo el tratamiento.

Óptima vista.

La cabeza estrecha del contra-ángulo permite una vista excelente al campo de tratamiento durante toda la intervención. El tratamiento se ve facilitado aún más por la rotación de 360° de la cabeza del contra-ángulo que permite un acceso óptimo al lugar de tratamiento.



Localizador de ápices integrado.

El localizador de ápices integrado hará su tratamiento aún más seguro. La medición automática de la longitud le muestra en tiempo real cuánto ha avanzado hasta el ápice, lo que minimiza el riesgo de una preparación excesiva.



Pero eso no es todo.

Las siguientes características adicionales del EnGO perfeccionan el tratamiento:

- **Potencia impresionante**

Con hasta 2500 revoluciones por minuto, EnGO abre la puerta a nuevos campos de aplicación, al tiempo que mantiene su alta precisión en todo momento.

- **Giratorio en todas las direcciones**

La rotación de 360° del contra-ángulo aislado permite un acceso óptimo a la zona de tratamiento.

- **Movimiento recíproco ajustable**

El ángulo recíproco puede ser configurado individualmente en intervalos de 10° para cualquier lima habitual.

- **Fácil de usar**

El diseño ergonómico y un funcionamiento tranquilo permiten controlar el EnGO óptimamente durante todo el tratamiento.

- **Movimiento automático**

Mayor control: EnGO arranca automáticamente al introducir la lima en el conducto radicular y se detiene al retirarla.

- **Recarga sin cable**

Ya sea durante el trabajo o la recarga: EnGO es totalmente flexible debido al diseño sin cable.

- **Batería de larga duración**

Siempre puede confiar en que la potente y duradera batería de EnGo le acompañará durante todo el tratamiento, aunque esto pueda tardar un poco más de lo esperado.



¡Empiece inmediatamente!

Gracias a los parámetros preinstalados para sus instrumentos Komet.

Los parámetros de todos los sistemas Komet ya están preinstalados. Sin embargo, también puede memorizar sus ajustes personales.

Limas FQ



FQ Opener

Modo de funcionamiento CW
Torque 2,4 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm



FQ Glider

Modo de funcionamiento CW
Torque 0,8 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm



FQ04 020 - 035

Modo de funcionamiento CW
Torque 1,8 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm



FQ04 045 - 055

Modo de funcionamiento CW
Torque 2,4 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm



FQ06 020 - 030

Modo de funcionamiento CW
Torque 2,4 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm

Limas Procodile Q



Rez. Opener

Modo de funcionamiento RECIP
Torque Auto



Procodile Q 020 - 050

Modo de funcionamiento RECIP
Torque Auto

Otras limas rotatorias



Opener

Modo de funcionamiento CW
Torque 2,5 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm



PathGlider

Modo de funcionamiento CW
Torque 0,5 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm



F360

Modo de funcionamiento CW
Torque 1,8 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm

Lima de retratamiento



Endo ReStart

Modo de funcionamiento CW
Torque 1,8 Ncm ⌚_{opt.} 300 rpm

Komet Dental

Gebr. Brüsseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160, 32631 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com
Contact for dealers:
export@kometdental.de

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 662 829-434
Telefax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Via Gianbattista Morgagni 36,
37135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Invoice and general correspondence:
27 Old Gloucester St,
Holborn, London WC1N 3AX
info@kometuk.com
www.kometuk.com