



## 环钻 | 227B

---




### 用于去除骨移植。

环钻227B可以预备直径为2.9至5.9mm，用于移植或病理学检查的骨圆柱体。直径较小的器械还可以理想地用于根尖切除术中骨盖的准备。

#### 该环钻具有哪些优势？


- 通过环钻工作区域的开口，不仅可以观察到手术部位，而且更加方便取出骨柱。
- 由不锈钢制成的环钻带有专门为切割骨质设计的高效切齿，确保了无创性治疗。
- 器械柄上带有内径和外径标志，做到一目了然。

**建议使用方法：**

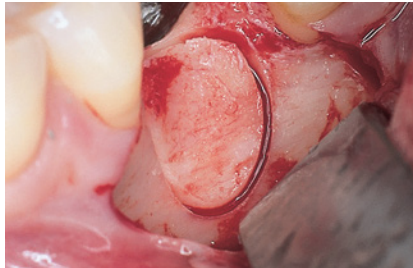


- 建议转速：  
最佳转速：☉<sub>opt.</sub> 800 -1.000 rpm  
最大转速：☉<sub>max.</sub> 6.000 rpm
- 在使用连续无菌生理盐水冷却的情况下，配合使用绿色反角手机（减速至少10:1）。


环钻			
尺寸	∅ 外径	∅ 内径	钻孔深度
040	4,0 mm	2,9 mm	最大 8,0 mm
050	5,0 mm	3,9 mm	最大 8,0 mm
060	6,0 mm	4,9 mm	最大 8,0 mm
070	7,0 mm	5,9 mm	最大 8,0 mm

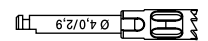


**227B.204.040**

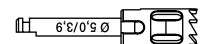

**227B.204.050**

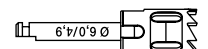

**227B.204.060**

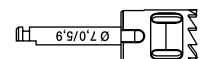

**227B.204.070**

