



Компас | Полиры для зуботехнической лаборатории

Рекомендации для эффективного применения лабораторных полиров






Частичные/полные протезы

Пластмасса

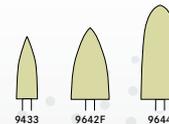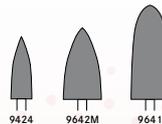


Облицовка, виниры, вкладки, коронки

Керамика

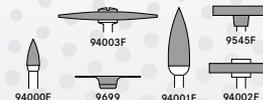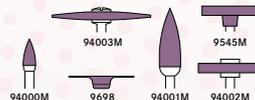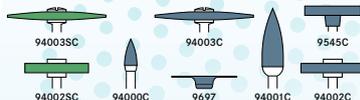

Вкладки, коронки, мосты

Драгоценные металлы

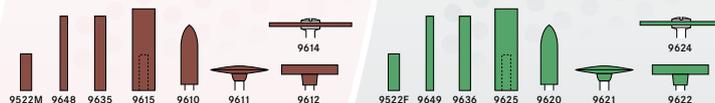



Коронки, мосты, базы протезов

Сплавы недорогих металлов



(Первичные) коронки, абатменты, краевая линия

Высокопрочная керамика
например: ZrO₂,
прессованная керамика

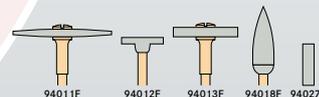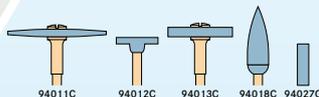

Предварительное полирование
создание формы

Полирование

Высокогляцевое полирование

Оптимальная скорость: $\varnothing_{\text{ш}}$ 6.000 об/мин Несоблюдение максимально допустимой скорости ведет к увеличению риска!

Допускаются изменения в ассортименте и искажения цвета.

Универсальные полиры

Сплавы драгоценных металлов/винирный акрил




Универсальные полиры для низкоглянцевого полирования

Металлические сплавы



Шлифовальный блок для полиров 593.000

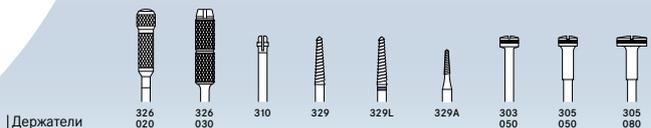

Держатели