



TarClean



AP3077

Liquide concentré acide pour l'élimination du tartre, des ciments sur les prothèses et les instruments dentaires.

Liquide prévu pour l'entretien régulier de toutes les prothèses ou éléments prothétiques sujets à des dépôts de tartre (prothèses, bridges, couronnes)

- Elimination totale des matériaux d'obturation provisoire et des oxydes métalliques ainsi que de nombreux matériaux de revêtement (spatules, verre, etc ...)
- Application par trempage (avec ou sans ultrasons)

Composition du produit :

Acide phosphorique, phosphonates, agents tensio-actifs, adjuvants

Domaine d'utilisation :

Elimination à l'acide du tartre et du ciment dans le cadre du nettoyage des prothèses et des instruments dentaires.

Nettoyage :

Pour bain de trempage : dilution à 10 - 20% dans l'eau
Aux ultrasons et en cas d'encrassement faible : utiliser une concentration à 5%, pendant 2 à 10 min. Puis rincer soigneusement à l'eau l'objet ainsi nettoyé.

Durée de conservation :

12 mois à partir de l'ouverture

Compatibilité avec les matériaux :

Compatible avec l'acier, les métaux précieux, les matériaux plastiques et l'aluminium ne présentant aucune détérioration.

Conditionnement :

AP3077 Flacon-doseur 1 litre

Dispositif médical : Classe IIb
Organisme notifié : TÜV Süd GmbH
Fabricant : Alpro Medical GmbH
04/2016 - 412016V2
Pour toute information complémentaire se référer à la notice d'utilisation.

