

Komet Info

01-14

Informations pour le cabinet dentaire.




La prophylaxie, avec les inserts SonicLine ou PiezoLine.

Peu importe, que vous travailliez plutôt avec des inserts soniques ou ultra-soniques : Komet® fait en sorte que vous trouviez toujours le bon insert. Avec SonicLine pour le sonique et PiezoLine pour l'ultra-sonique, 2 systèmes complets sont à votre disposition pour servir de référence en matière de précision et d'efficacité : pour le détartrage, les traitements parodontaux ou la prophylaxie implantaire.



Inserts PiezoLine

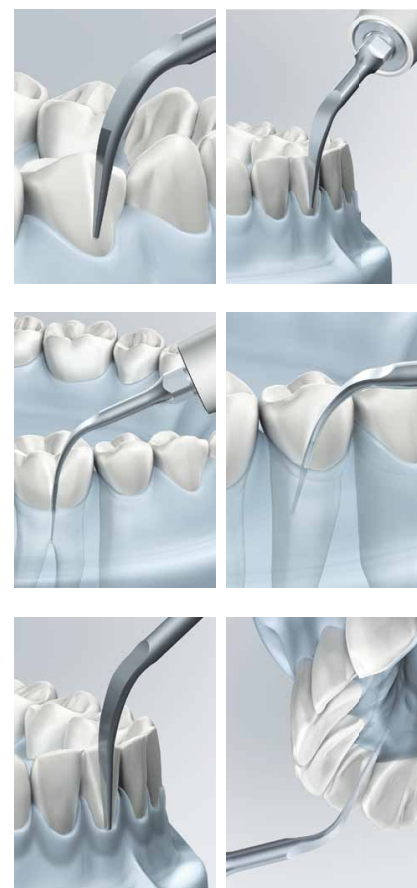

Dispositifs médicaux : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)
Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
06/2014 - 413151V0
Pour toute information complémentaire
se référer aux notices d'utilisation.

F360[®]. 1ère solution universelle de préparation canalaire.

Préparation mécanisée de tous vos canaux avec 1 seul instrument.

Utilisation appropriée des limes F360.
Avant d'utiliser les limes F360, l'utilisation d'un opener (ex. AlphaKite Opener) est recommandée pour élargir l'accès au canal. La perméabilité du canal doit avoir été préalablement vérifiée au moyen d'une lime manuelle (par ex. K15).
Les F360 sont à utiliser en rotation continue jusqu'à la longueur de travail dans un mouvement de « pecking » (va et vient) de manière à être continuellement en mouvement dans le canal.
Après le passage de l'instrument, l'opérateur a le choix, selon sa technique, soit d'obturer directement (ex. pâte-cone), soit d'augmenter la conicité en brossant les parois en appui pariétal, soit d'élargir sa préparation au moyen de son instrument de finition habituel (par ex. 25/100^{ème}, 6 %).

1 patient = 1 lime

- **Un seul instrument** pour la préparation de tous vos canaux (25/100^{ème}, 4 %)
- **Sur votre moteur** (ou C.A.) endo habituel
- **Grande flexibilité** pour une meilleure adaptation aux différentes morphologies canalaire


F360 existe dans les tailles 25, 35, 45 et 55 en longueurs 21, 25 et 31.

opt. 250-350 t/min.
Torque: 1,8 Ncm

STERILE




Quality Products
Made in Germany

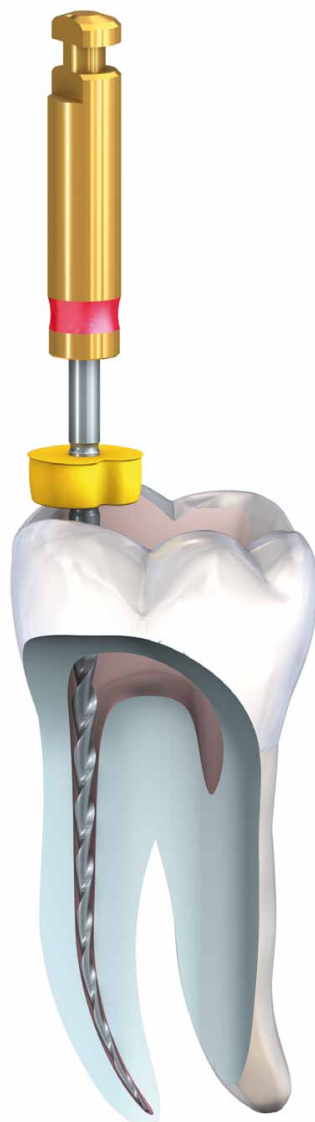

Pour vos réglages des full céramiques.

Pour répondre aux besoins des praticiens, Komet a créé un kit avec fraises pour turbine et les polissoirs pour contre angle. Les éventuelles retouches lors de la pose des prothèses en bouche peuvent ainsi être effectuées selon le même protocole.

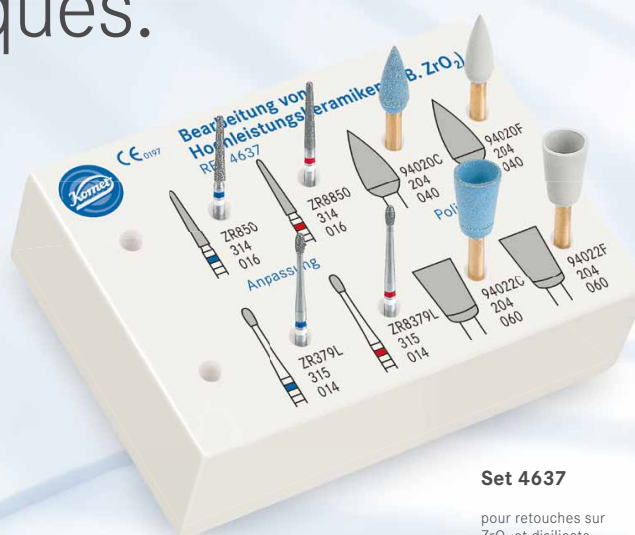

Set 4637

pour retouches sur ZrO₂ et disilicate