



## Weißlingspolierer | $ZrO_2$

---



### 2-stufiger Polierer für $ZrO_2$ Weißlinge.

Der neue „2 in 1“ Polierer ermöglicht durch sein 2-Zonen-Arbeitsteil und seine spezielle Formgebung die Bearbeitung von  $ZrO_2$  Weißlingen. Die graue Zone des Polierers verfügt über ein grobes Poliermedium. Sie reduziert schnell und kontrolliert die Haltestege. Mit der weißen Arbeitsteilspitze, der 2. und feinen Zone, können beispielsweise okklusale und interdentale Bereiche oder Kronenränder nachgearbeitet werden. Der Weißlingspolierer lässt sich bei einer optimalen Drehzahl von  $6.000 \text{ min}^{-1}$  angenehm und präzise führen. Die material-schonende Bearbeitung kommt den  $ZrO_2$  Weißlingen zu Gute. Das Risiko einer Beschädigung des kreideartigen Rohlings wird dadurch deutlich minimiert. Das Glätten der Weißlingsoberflächen reduziert zudem die aufwendige Nachbearbeitung im gesinterten Zustand.

#### Die Vorteile auf einen Blick:

- 2 Polierstufen in einem Polierer
- gutes Handling
- angenehm weiches und präzises Arbeiten
- oberflächenschonend

### Anwendung:

1. und 2. Vibrationsarmes Verschleifen der Haltestege.

3. Oberflächen glätten. Schnell, sicher und präzise.



### Anwendungshinweise:

- Hervorragende Arbeitsergebnisse bei einer Drehzahl von  $\varnothing_{\text{opt.}} 6.000 \text{ min}^{-1}$ .
- Mit geringen Anpressdruck arbeiten.



9706.104.070