

Kompass | Prophylaxe


Empfehlung für den Einsatz von Prophylaxeinstrumenten in der zahnärztlichen Praxis




SonicLine

1 Anwendung | Scaling

Schallspitzen


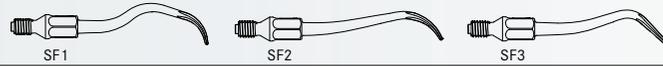


2 Anwendung | Perio

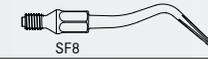


PiezoLine



Ultraschallspitzen **EM1** - kompatibel mit EMS Einheiten

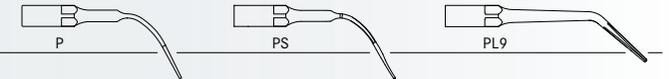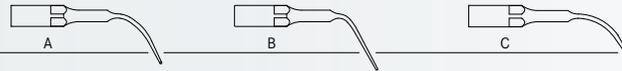

Ultraschallspitzen **SI1** - kompatibel mit Sirona® Einheiten

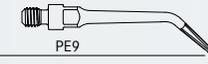

Ultraschallspitzen **KA1** - kompatibel mit KaVo PIEZOLux™ Einheiten

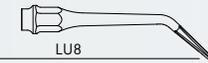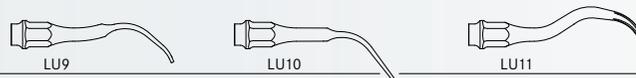


Polierer und Bürsten

3 Anwendung | Polieren

Polierer (latexfrei)



Bürsten und Träger

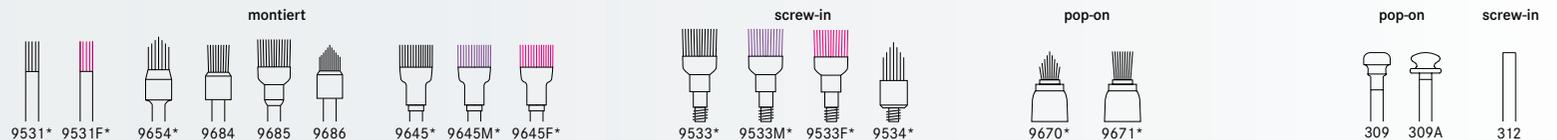

Polierer und Bürsten

Sachgemäße Anwendung

- Polieren Sie immer nur mit leichter Anpresskraft, um die Hitzeentwicklung zu minimieren.
- Polieren Sie immer in leicht kreisförmigen Bewegungen.

Drehzahlen

☉_{opt.} 1.500 min⁻¹

Höhere Drehzahlen führen zu schlechteren Oberflächenergebnissen. Die **maximal zulässige Drehzahl** entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Verpackung und aus dem Katalog. **Das Nichteinhalten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko!**

Fordern Sie unsere Prophylaxe-Broschüre (410354) mit vielen interessanten Artikeln für die Prophylaxe an!

Schall- und Ultraschallspitzen

Sachgemäße Anwendung

- Leistungsstufen beachten, die richtige Leistungsstufe entnehmen Sie bitte der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
- Vor dem Ansetzen an den Zahn die Spitze mit ausreichend Spraykühlung in Betrieb nehmen. Hierfür muss bei allen Scalern eine hohe Durchflussmenge eingestellt werden.
- Die Spitzen sollten mit geringer Anpresskraft eingesetzt werden, da eine zu hohe Anpresskraft die Schwingungen der Spitze und somit die Effektivität verringert.

