

SonicLine Quick

Scaler/Paro/Perio | SFQ1-8



== max. 2 mm



SFQ1

SFQ2

SFQ3

SFQ4

SFQ4L

SFQ4R

SFQ8

Indicazione/Indication

SFQ2008L

Livello di potenza
Power Level

	1	2	3
Scaler	1	2	3
Profilassi implantare/Implant prophylaxis	1	2	●
Paro/Perio	1	2	3
Lisciatura della superficie radicolare/Root Planer	1	2	●
Preparazione delle corone/Crown Prep	1	2	●
Preparazione prossimale delle cavità/Interproximal Cavity Prep, Inlay	1	●	3
Micro/Bevel	1	●	●
Stripping/Shaping	1	●	●
Chirurgia*/Surgery*	1	2	●

*SFSQ100/101/102 anche consentito al livello 3.

*SFSQ100/101/102 also permitted in level 3.

● consentito/permitted

● solo per brevi intervalli/permitted for a short time only

● non è consentito/not permitted