




Ich bin ein neues
Level der Flexibilität.
Ich bin **F6** SkyTaper.

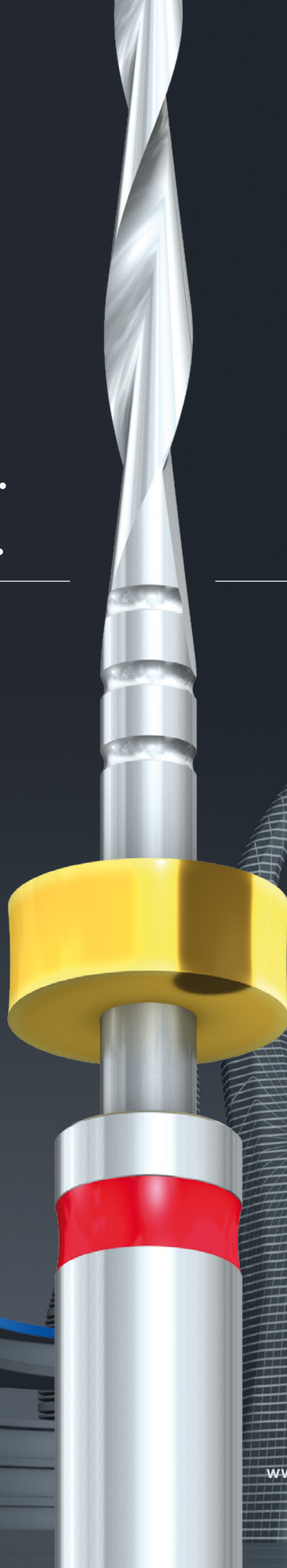



Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® und TissueMaster Concept® sind eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.


Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: Juli 2018

Größerer Taper, größeres Spektrum.

- rotierende Aufbereitung mit einer Feile in Taper .06
- lückenloses Feilenspektrum mit 5 Feilen-
größen für alle Wurzelkanalanatomien
- Flexibilität und Effizienz durch
intelligentes Feilendesign
- steril verpackte Single-Use Feilen

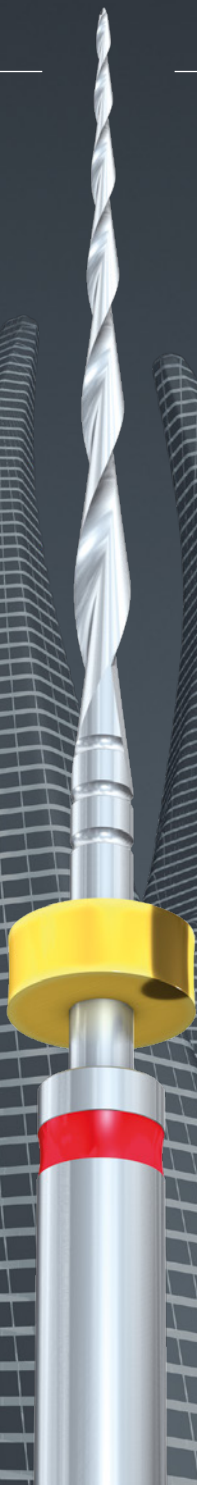


Kompromisslose Flexibilität.

Flexibilität in System und Anwendung

- Lückenloses System: NiTi Feilen in fünf unterschiedlichen Größen und drei Längen für jede Kanal Anatomie
- freie Wahl der Obturationsmethode dank Taper .06
- rotierender Einsatz in allen drehmomentbegrenzten Endo-Winkelstücken und -Motoren

Effizientes und flexibles Feilendesign

- eine Feile für den Großteil der Wurzelkanäle
- effizienter Doppel-S-Querschnitt für hohe Reinigungsleistung
- hervorragende Einhaltung des Kanalverlaufs

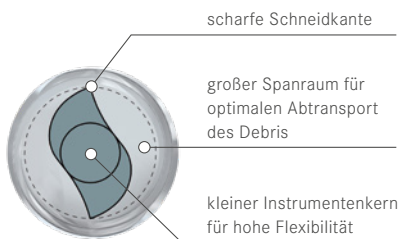

Feilenquerschnitt

[01] Großzügige Aufbereitung des Kanaleingangsbereiches, z. B. mit dem Opener OP10L19.


[02] Herstellung eines Gleitpfades, z. B. mit einer K-Feile in Größe 015.


Die Wahl der passenden F6 SkyTaper Feile erfolgt in Abhängigkeit zur zuvor verwendeten (Hand-) Feilengröße.

Die Regel:

Eine ISO-Feilen-Größe überspringen.

[03] Kanalaufbereitung mit der F6 SkyTaper Feile.

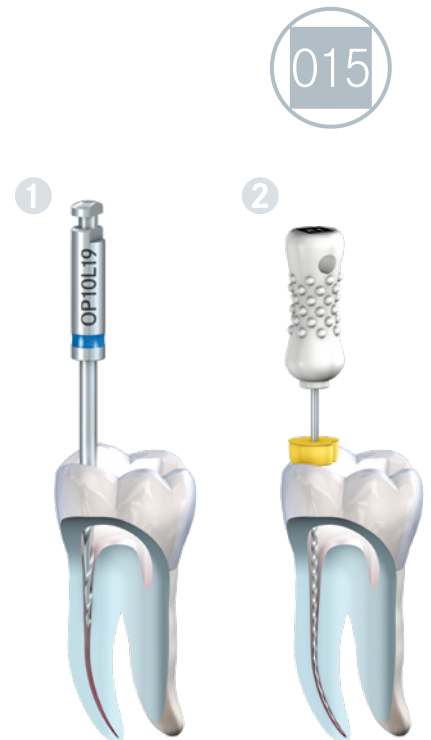

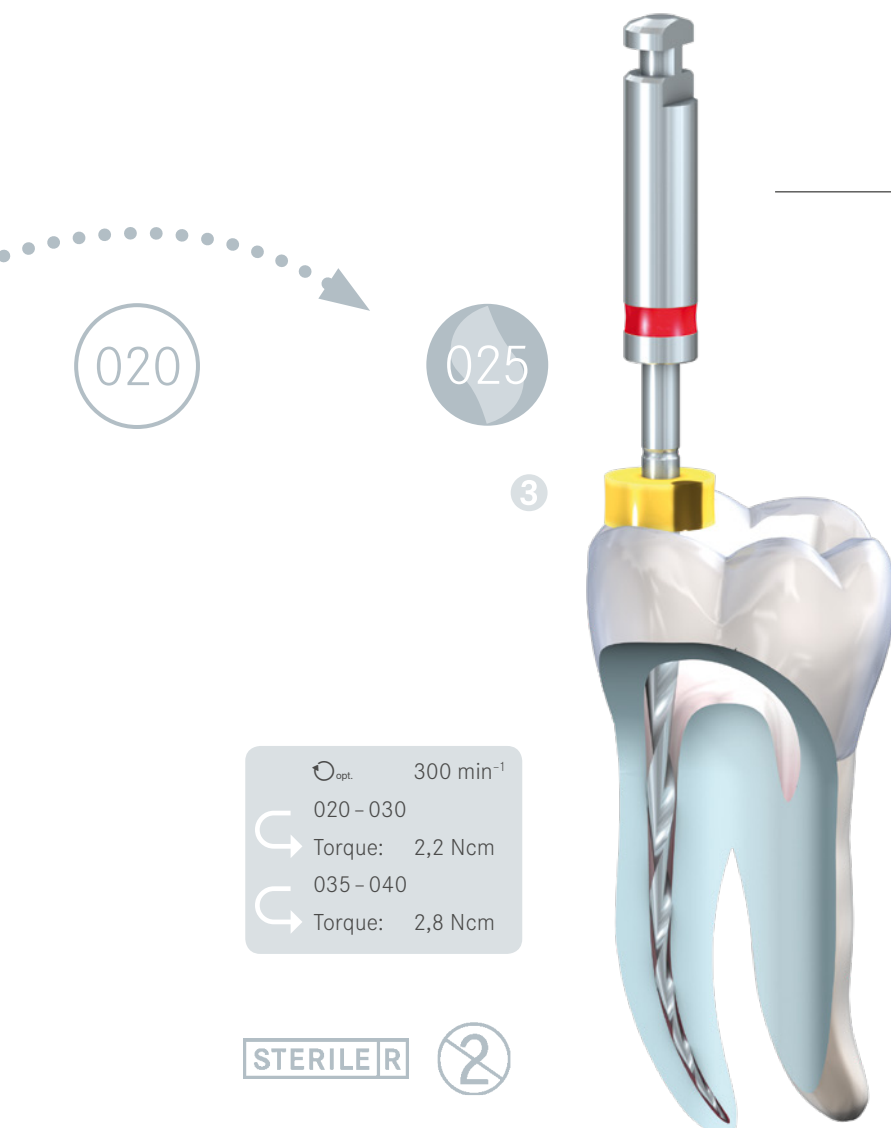

Dr. Günther Stöckl

Spezialist für Endodontie
in Rottenburg an der Laaber

„F6 SkyTaper ist ein System sowohl für den Allgemeinzahnarzt als auch den Spezialisten. Die Schnittfreudigkeit der Instrumente verkürzt die Aufbereitung, was es mir erlaubt, mehr Zeit in die chemische Desinfektion zu investieren.“

Der 6% Taper gefällt mir besonders gut:
Er bereitet das Kanalsystem optimal auf die spätere kalte oder warme Obturation vor.
Ich möchte das System in meinem Aufbereitungskonzept nicht mehr missen!“

F6 SkyTaper.

Perfektion mit allem, was dazu gehört.



F06L21/L25/L31.204.020



F06L21/L25/L31.204.025



F06L21/L25/L31.204.030




+ Optional
für weite Kanäle



F06L21/L25/L31.204.035



F06L21/L25/L31.204.040

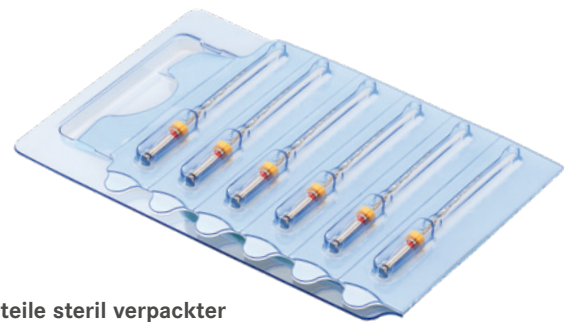

Vorteile steril verpackter Single-use Instrumente:

- Frakturgefahr durch zyklische Ermüdung wird reduziert
- Risiko der Kreuzkontamination wird ausgeschlossen
- kein Aufwand für Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) und Dokumentation der Einsatzhäufigkeit



9938 E-Drive
Endodontie-Winkelstück

Zubehör für die Aufbereitung:




● **OP10L19.204.030**
Opener



○ **PG03L21/L25/L31.204.015**
PathGlider



● **PG03L21/L25/L31.204.020**
PathGlider

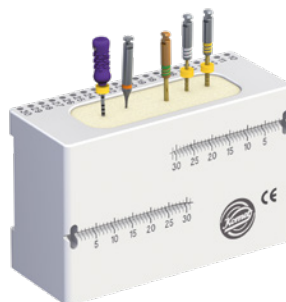

595 Interimstand

Zubehör für die Obturation:



9994 F360 Fill Ofen



9996 F360 Fill Obturatoren



9995 F360 Fill Verifier



PPF06 F6 SkyTaper Papierspitzen

GPF06 F6 SkyTaper Guttaperchaspitzen



9978 EasySeal
Wurzelfüllmaterial auf Epoxidharzbasis

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de