

SonicLine Quick

Inserts à détartrer/Paro | SFQ1-8



== max. 2 mm



SFQ1

SFQ2

SFQ3

SFQ4

SFQ4L

SFQ4R

SFQ8

Indication	SFQ2008L	Niveau de puissance		
		1	2	3
Prophylaxie		1	2	3
Nettoyage des implants		1	2	●
Traitement parodontal		1	2	3
Surfaçage radiculaire		1	2	●
Préparation coronaire		1	2	●
Préparation des cavités, Inlays		1	●	3
Micro/Bevel		1	●	●
» Stripping «, mise en forme		1	●	●
Chirurgie*		1	2	●

*SFSQ100/101/102 aussi permis sur niveau 3.

- permis
- seulement pendant une courte période
- interdit