



Contrangolo | E-Drive



Contrangolo per endodonzia a momento torcente limitato.

Il contrangolo per endodonzia E-Drive si inserisce direttamente sull'attacco del micromotore ed è indicato per tutti i più comuni sistemi di lime Ni-Ti (per es. F360).

Grazie ai cinque livelli di momento torcente limitato e alla possibilità di regolare anche livelli intermedi, la preparazione meccanica del canale radicolare si rivela semplice e sicura.

Se al superamento del momento torcente la lima si blocca nel canale, è possibile sbloccarla grazie all'innesto elettromagnetico e la retrorotazione (movimenti sinistra-destra).

Caratteristiche del prodotto:

- Innesto diretto del dispositivo E-Drive sull'attacco del micromotore dell'unità di trattamento
- 5 livelli di momento torcente limitato
- Regolazione opzionale di livelli intermedi
- Regolazione diretta del momento torcente sull'anello di preselezione del contrangolo
- Trasmissione: 115:1
- Numero massimo di giri motore: \varnothing_{\max} 40.000 giri al min.⁻¹
- Movimento rotante completo a 360°
- Sicurezza garantita grazie a retrorotazione
- Buona visuale grazie alla piccola testa
- Sterilizzabile in autoclave fino a un massimo di 134°C

Limiti del momento torcente:

Il dispositivo E-Drive prevede cinque livelli di momento torcente limitato che possono essere selezionati direttamente sul contrangolo. Ruotando l'anello di preselezione è possibile regolare il livello di momento torcente più adatto. Per determinare quale livello di momento torcente meglio si adatta alla lima per il canale radicolare, è possibile utilizzare la scheda torsionometrica corrispondente.

I singoli livelli corrispondono ai seguenti momenti torcenti espressi in Ncm:

Livello 1	0,40 Ncm
Livello 2	1,00 Ncm
Livello 3	1,50 Ncm
Livello 4	1,75 Ncm
Livello 5	3,00 Ncm



Utilizzo del contrangolo E-Drive:

1. Ricavare il momento torcente più adatto alla lima consultando le istruzioni per l'uso/ la scheda torsionometrica del sistema di lime meccanico.
2. Selezionare il livello da regolare in base al momento torcente corrispondente (vedere le istruzioni per l'uso del contrangolo E-Drive)
3. Regolare il livello più adatto di momento torcente ruotando l'anello di preselezione. L'anello è in posizione quando lo spigolo anteriore corrisponde al contrassegno del livello prescelto.



9938
Contrangolo per endodonzia E-Drive con momento torcente limitato a cinque livelli

