


PiezoLine

Détartrage/Paro

S1, S1S, S10Z, S10X, PFU.ST1



≡ max. 2 mm

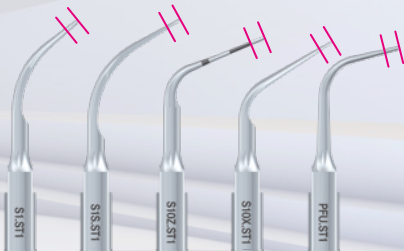

Indication**Niveau de puissance
Satelec et NSK**

		Newtron P5 (XS) P5 Newtron (XS) P-Max Newtron XS	Prophymax Newtron	Suprasson P5 Booster	Varios 970 Varios 370
Détartrage	S1 S1S	14-15	8-10	7-9 7-10	G8
	S10X S10Z	12-14	6-8	7-8	G8 G6
	S10P	14-15	8-10	7-8	G7
Prophylaxie implantaire	S1981 SF1982	13	10	13	G7
Paro	PFU-PFR	14-15	8-10	7-8	G8

Remarque : débit du spray minimum 50 ml/min.