



BlueTip.

Conseils d'utilisation
Étape par étape.




[01] Vissez manuellement l'insert d'activation BlueTip dans le filetage de la pièce à main sonore, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ressentir une légère résistance. Veillez à ce que l'insert d'activation :

- ne se torde pas,
- ne se plie pas.



[02] Remplissez la chambre pulpaire avec l'une des solutions de rinçage suivantes :

Solution de NaOCl	max. 5,25 %
EDTA	max. 17 %
Acide citrique	max. 10 %
H ₂ O ₂	max. 3 %
CHX	max. 2 %

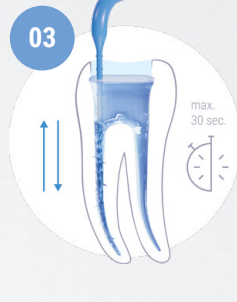

[03] Insérez l'insert d'activation dans le canal radiculaire, puis activez la pièce à main sonore pendant 30 secondes maximum, selon les besoins. Effectuez simultanément des mouvements de va-et-vient avec l'insert d'activation, sans exercer de pression.

Important :


Réglez la fréquence de la pièce à main sonore sur le niveau de puissance maximal, sans dépasser 6 000 Hz

(alimentation en air maximale : 0,3 MPa (3 bar)).


N'activez l'insert de rinçage que lorsqu'il se trouve à l'intérieur du canal radiculaire.

L'insert de rinçage est un dispositif stérile à usage unique, destiné à être utilisé sur un seul patient. Il ne doit pas être désinfecté ni stérilisé en autoclave.


Toute réutilisation de l'insert de rinçage augmente le risque de fracture spontanée et peut entraîner une contamination croisée.

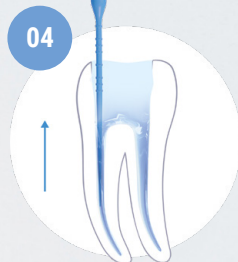

[04] Répétez le processus de rinçage après chaque étape de préparation en activant la solution de rinçage à l'aide de l'insert d'activation.

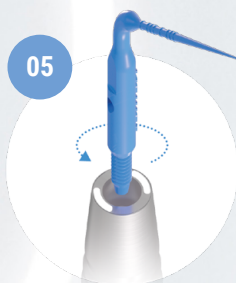

[05] Après utilisation, retirez l'insert d'activation de la pièce à main sonique en le dévissant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

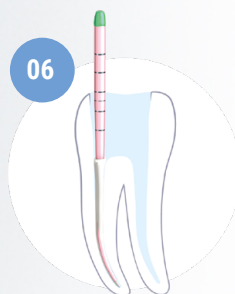


[06] Séchez le canal radiculaire, puis procédez à son obturation selon la méthode de votre choix, par exemple en utilisant la technique monocône en combinaison avec Komet **BioSeal**.

N'utilisez que des solutions de rinçage disponibles dans le commerce et conçues à cet effet pour irriguer le canal radiculaire :

Solution de NaOCl	max. 5,25 %
EDTA	max. 17 %
Acide citrique	max. 10 %
H ₂ O ₂	max. 3 %
CHX	max. 2 %

Bon à savoir :

Pièces à main soniques compatibles :
Komet SF1LM/SF1LS, W&H ZA-55, NSK
Ti-Max 970, KaVo SONICflex 2003

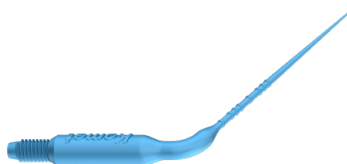

SFPA66.000.020

STERILE



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany
Phone +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com

Komet Germany

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 800 7701-700
Fax +49 (0) 800 7701-800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Komet Austria

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Phone +43 (0) 0800 70170070
Fax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

SA à conseil d'administration, s.a.i.
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Komet Italy S.r.l.
Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Komet Dental Instruments UK Limited
Unit 8 Arden House · Marsh Lane
Hampton In Arden · B92 0AJ
Phone +44 (0) 2046 200580
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Komet International Distribution

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 5261 701-0
export@kometdental.de
www.kometdental.com

