



BlueTip.

Instrucciones de uso
Paso a paso.



[01] Enrosque la punta de activación BlueTip en la rosca de la pieza de mano sónica con la mano en sentido horario hasta que note un ligero aumento de la resistencia. Tenga cuidado de no

- doblar o
- retorcer la punta de activación.



[02] Llene la cámara pulpar con una de las siguientes soluciones de irrigación:

Solución de NaOCl	máx. 5,25 %
EDTA	máx. 17 %
Ácido cítrico	máx. 10 %
H ₂ O ₂	máx. 3 %
CHX	máx. 2 %



[03] Introduzca la punta de activación en el conducto radicular y encienda la pieza de mano sónica durante un máximo de 30 segundos, según sea necesario, moviendo la punta de activación hacia arriba y hacia abajo sin ejercer presión.

Importante:

La frecuencia de la pieza de mano sónica debe ajustarse al nivel de potencia más alto, asegurándose de no superar el límite superior de 6000 Hz **(Suministro de aire a un máximo de 0,3 Mpa (3 bar))**.


Active la punta de irrigación únicamente cuando se encuentre dentro del conducto radicular.

La punta de irrigación es un producto estéril y desechable. Está destinada a ser utilizada en un solo paciente. La punta de irrigación no puede desinfectarse ni esterilizarse en autoclave.

La reutilización de la punta de irrigación aumenta el riesgo de fractura espontánea de la punta y puede provocar contaminación cruzada.




04

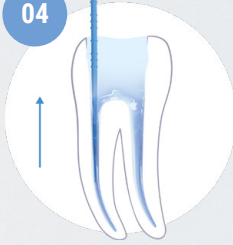


[04] Repita el proceso de irrigación después de cada paso de la preparación, activando la solución de irrigación con la punta de activación.

05

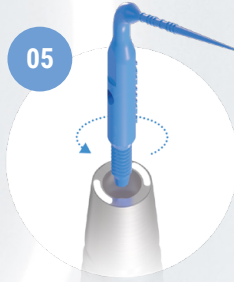

[05] Una vez finalizada la aplicación: Desenrosque la punta de activación de la pieza de mano sónica con la mano, girándola en sentido antihorario.

06

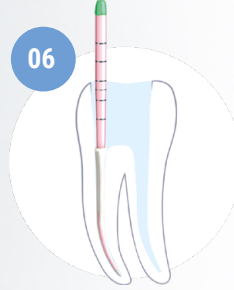

[06] Seque el conducto y obtúrelo utilizando su método preferido, por ejemplo, la técnica de perno único en combinación con Komet **BioSeal**

Para la irrigación del conducto radicular, utilice únicamente soluciones de irrigación disponibles en el mercado y diseñadas para este fin:


Solución de NaOCl		máx. 5,25 %
EDTA		máx. 17 %
Ácido cítrico		máx. 10 %
H ₂ O ₂		máx. 3 %
CHX		máx. 2 %

Información útil:

Piezas de mano compatibles:

Komet SF1LM / SF1LS, W&H ZA-55, NSK

Ti-Max 970, KaVo SONICflex 2003

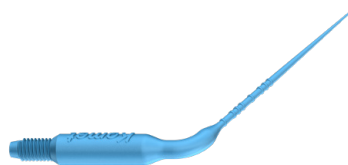

SFPA66.000.020

STERILE R



Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany
Phone +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com

Komet Germany

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 800 7701-700
Fax +49 (0) 800 7701-800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Komet Austria

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Phone +43 (0) 0800 70170070
Fax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

SA à conseil d'administration, s.a.i.
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Komet Italy S.r.l.
Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Komet Dental Instruments UK Limited
Unit 8 Arden House · Marsh Lane
Hampton In Arden · B92 0AJ
Phone +44 (0) 2046 200580
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Komet International Distribution

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 5261 701-0
export@kometdental.de
www.kometdental.com

